




## Instalación y mantenimiento de la batería de seguridad en las camas Etude

La caja de la batería está situada en la sección del motor de las piernas y queda fijada mediante la abrazadera (A). El cable corto de la batería se conecta al motor de la sección de las piernas (B) sujeto por un retén (C). El cable largo de la batería se conecta a la caja de control del motor de respaldo (D).

Un LED (E) indica que la batería se puede cargar.

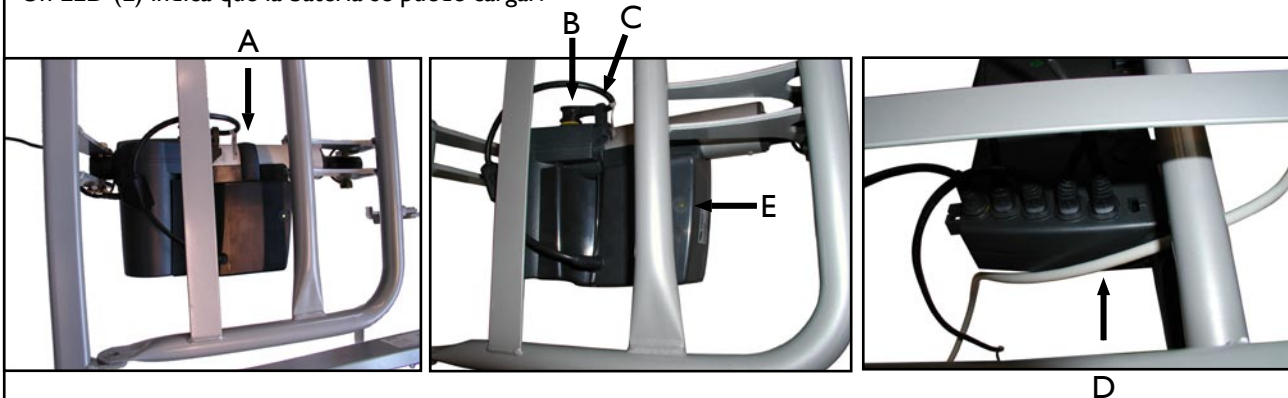

### Mantenimiento preventivo

La batería debe sustituirse cada 4 años. En función de la frecuencia de uso la sustitución puede tener que realizarse antes. Normalmente, descargas frecuentes reducen la vida útil de la batería.

Recomendamos que la batería sea revisada al menos una vez al año.

La batería no se estropea por el hecho de estar conectada.

### Sustitución de la batería

La batería debe ser sustituida por una batería original Invacare o por una batería que sea compatible tanto a nivel mecánico como eléctrico (12V - 1.3Ah).

La batería debe renovarse o cargarse al menos cada 6 meses por razones de mantenimiento.



**Atención!** La batería vieja o defectuosa pueden generar una mezcla de gases explosivos durante el proceso de carga.

La caja de la batería cuenta con aberturas para asegurar una correcta ventilación de la caja.

Los orificios de ventilación no deben bloquearse ni cubrirse ya que puede aumentar la presión y explotar.

### Desecho de la batería

La batería vieja debe ser depositada en contenedores de reciclaje.